

Höftbälte till komfortrullstol

Höftbälten finns med 2 eller 4 infästningar, dvs de fäst med ett eller två band på varje sida.

Du kan välja vilket höftbälte du vill under funktionsrad 09 07 03 i Hjälpmedelsportalen.

Alla våra komfortrullstolar är utrustade med fästen för höftbälten.



På bilden syns ett antrirotationssbälte monterat på en komfortrullstol Azalea.



1. Trä bandet genom åttan.
2. Trä bandet genom skåran i rullstolsfästet.
3. Trä tillbaka bandet genom åttan.
4. Fortsätt och trä bandet genom åttan.
5. Dra tillbaka bandet ytterligare en gång för extra stabilitet.

Obs! Höftbältet måste vara hårt åtdraget.

Läs mer i bruksanvisningen av det bälte du beställer.