

Sittanpassning – Inskränkt höftflexion

Om patienten inte kan böja i höften till 90 grader blir det svårt att sitta upprätt. Patienten kan kasa framåt eller luta åt sidan. Då behöver rullstolens dyna anpassas efter den rörlighet patienten har.



Ibland kan man använda rullstolsdynan Bima Cube-kick, som finns i under funktionsområde 04 03 33 Dyna AE, i Hjälpmedelsportalen. Dynan ska vara PLAN eftersom komfortrullstolen har en plan sits.



Våra tekniker kan också göra en anpassning att lägga under tex en Vicair-dyna.



Skriv en arbetsorder

Kryssa i Justering/Inställning

Gör en anpassning i PZ-material som ska ligga under sittdynan.
Bredd: XX cm, Djup: XX cm, Höjd: XX cm.
På vänstra halvan (respektive högra) sida ska PZ- skivan XX cm från bakkant slutta ner mot 0 cm i framkant.
Kardborre över och under som ska passa rullstolen XX och dynan XX.
(Eventuellt: Skär ut i bakkant för ryggrören.)

Du kan också kontakta en hjälpmedelskonsulent för att specialbeställa en dyna.