

July 2026

Bilaga D
Säkerhetsmeddelande till marknaden
Oxygenkoncentrator Kröber O2 / Kröber O2 version 4.0

Åtgärder som användaren måste vidta

Tills den nödvändiga omjusteringen har genomförts ska du följa
nedanstående procedur varje gång innan du använder din
syrekonzentrator:

1. Slå på oxygenkoncentratorn och notera det aktuella inställda oxygenflödet.
2. Ställ in oxygenflödet på 5 L/min.
3. Blockera oxygenflödet kortvarigt, till exempel genom att vika slangen till
nåskanylen eller täppa till utloppet.
4. Ställ in oxygenflödet på den ursprungliga inställningen.
5. Oxygenkoncentratorn kan nu användas utan begränsningar.