

Sänka allroundrullstol Cross

Ibland behöver rullstolen sänkas.

För att veta höjden, om användaren ska sparka sig fram, måste du mäta patientens underbenslängd.

Rullstolens höjd ska vara =

Underbenslängd (med skor om sådana används) - **Sittdynans höjd**

I beställningsportalen har vi gjort några olika förslag på underlag.



- **12** Hjälpmedel för aktiviteter och delaktighet relaterade till personlig förflyttning och transport
 - + 1203 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm
 - + 1206 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna
 - **1222** Manuella rullstolar
 - **122203** Manuella tvåhjulsdrevna rullstolar
 - Aktivrullstol, barn
 - Aktivrullstol, vuxen
 - Allroundrullstol, barn
 - Allroundrullstol, vuxen**

Utifrån vilken sitthöjd du vill ha väljer du förskrivningsunderlag:

- 150. Cross TILLBEHÖR, SÄNKNING: sitthöjd 43 cm >
- 151. Cross TILLBEHÖR, SÄNKNING: sitthöjd 40,5 cm >
- 152. Cross TILLBEHÖR, SÄNKNING: sitthöjd 38 cm >
- 153. Cross TILLBEHÖR, SÄNKNING: sitthöjd 34 cm >

Under varje underlag framgår vad du ska beställa för att sänka stolen.

Obs ! Det behövs **2 st** drivhjul, länkhjul och framgafflar.

Det är olika drivhjul beroende på vårdarbromsade hjul eller inte.

Vid nybeställning: Beställ även rullstolen från förskrivningsunderlaget för den önskade bredden.

Vid efterbeställning: Lägg till en arbetsorder. Välj Justering/Inställning.

Bara en fot i golvet

För personer som ska driva rullstolen med ett ben och en hand behöver man välja en dyna som ger stöd för hela låret för det ben som har fotstöd samtidigt som patienten når ner med sparkbenet.



Du kan tex välja dyna Bima Cubeteck som ligger under funktionsrad 043303. Den är ca 4 cm hög vid framkant vid sparkbenet och högre för det andra benet.

