



Byta rygg och/eller montera nackstöd på arbetsstol Real

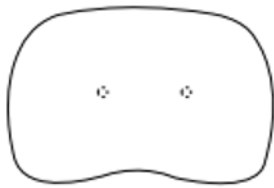

Låg rygg = fäst med två skruvar.

Låg rygg sitter på stolar utan tilt i standardutförande.

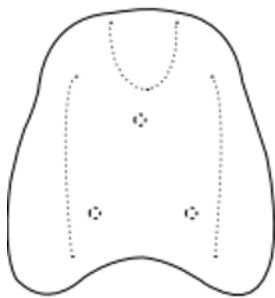

Hög rygg = fäst med tre skruvar.

Hög rygg sitter på stolar utan tilt i standardutförande.

Du kan enkelt byta mellan olika höga och olika låga ryggar.

I beställningsportalen hittas alla alternativa ryggar och nackstöd under ISO kod 18 09 03:

[TILLBEHÖR REAL 9000 och 9040: alternativa sitsar, ryggstöd, nack- och bålstöd samt benstöd >](#)

[TILLBEHÖR REAL 9100 och 9150: alternativa sitsar, ryggstöd, nack- och bålstöd samt benstöd >](#)



Ta bort ryggstödet genom att:

- lossa på ratten
- trycka in pluppen vid pilen
- dra ryggen uppåt.

Lägg ryggstödet på ett bord.


Använd 5:ans insexnyckel.



Skruva bort skruvarna med 5:ans insexnyckel.



Ta fram den nya ryggen och skruva fast ryggmekanismen igen.

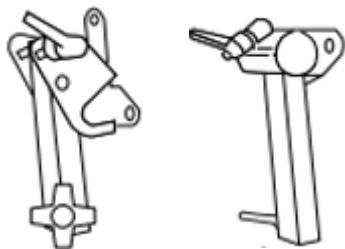

Om du vill byta mellan hög och låg rygg eller tvärt om behöver du byta ryggmekanism.

Gå in på det förskrivningsunderlag för den stolen du har. Där framgår vad du ska beställa.

Nackstöd

Nackstöd passar bara höga ryggar.

Obs! Det är först när en stol tillas bakåt och huvudet kommer bakom lodlinjen som ett nackstöd behövs.

Fästet monteras mellan ryggen och ryggmekanismen.



Läs mer om hur du monterar ett nackstöd i

[Brukanvisning Nackstöd från Mercado Medic](#)