

Syfte med dokumentet: Följande instruktion förklarar hur man kontrollerar om modulen påverkas av det potentiella problem som kan förändra modulens pneumatiska funktion, enligt vad som anges i informationsbrevet **AC25-007**.

Som en påminnelse har enheter som kan vara föremål för detta problem serienummer mellan EO0702406001B och EO0702505165B.

1) Revisionshistorik:

Rev	Ändring	Datum	Publicerad av
A	Skapande	01/09/2025	S.Laiguillon

2) Procedur

Steg 1 Starta kalibreringen i IPPB-läge:

- ✓ Gå till **inställningsmenyn** och välj **IPPB-läget**.
- ✓ Anslut rätt kretsconfiguration och tillbehör (utan patientgränssnittskretsen).
- ✓ Gå till **Meny/Kalibrering** och starta en kretskalibrering genom att följa stegen som visas på skärmen.

Steg 2 Starta en kalibrering i INEX-läge:

- ✓ Gå till **inställningsmenyn** och välj **INEX-läget**
- ✓ Anslut rätt kretsconfiguration och tillbehör (utan patientgränssnittskretsen).
- ✓ Gå till **Meny/Kalibrering** och starta en kretskalibrering genom att följa stegen som visas på skärmen

3) Slutsats:

- De två stegen har slutförts framgångsrikt:
 - ⇒ Modulen påverkas därför inte av detta problem och är fullt funktionsduglig.
- En av de två kalibreringarna misslyckades flera gånger:
 - ⇒ Modulen kan påverkas av detta problem.
Skicka en förfrågan till sav@eove.fr och ange modulens serienummer+ era anledningen till returen (**kod AC25-007**).

 New Medical Inspiration	Titel: EO-70 Kalibreringsverifiering	Dokumentnummer: INS102_2501	REV A
Konfidentiellt – Får inte användas, reproduceras eller avslöjas utan föregående skriftligt tillstånd från EOVE.			