

Guide till att välja rollator

Personfaktorer	Mått	Kommentar
Handtagshöjd (mät golv-handled)	_____ cm	Utgår alltid utifrån detta mått i val av rollator!
Brukarvikt	_____ kg	Obs, kontrollera max brukarvikt på rollatorn
Vid behov, sittbredd	_____ cm	Fungerar det att sitta på rollatorn?

Omgivning	Ja	Nej	Kommentar
Inne			
Ute			
Viktiga mått Ex) smal dörr, liten hiss, storlek bostad			Ange mått:
Behov av att lyfta rollatorn ex) över trottoarkanter, i/ur bil, upp på buss			Obs lätt rollator blir oftast inte lika stabil

Se jämförelselistan för rollatorer som passar patientens mått.

Tänk på!

- I första hand ska en rollator förskrivas för kombinerad för inomhus- och utomhusanvändning!
- En lättare rollator blir inte lika stabil som en tyngre och bredare.
- Behöver rollatorn fällas ihop på ett specifikt sätt?
- Rollatorer med stora hjul ofta blir högre, det kan vara svårt att hitta en rollator med stora hjul till en kort person.
- En bredare rollator kan vara lättare att sitta på men kan vara svårare att ta sig fram med på t.ex. bussar/hissar/affärer.
- Hittar du inte en passande rollator i beställningsbart sortiment eller om patienten har speciella behov:

Vid frågor, kontakta sortimentsansvarig konsulent eller maila till

hjmsadl.slso@regionstockholm.se