



November 2025

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden
Produkt: FreeStyle Libre 3 och FreeStyle Libre 3 Plus sensorer

Referens: ADC FA1002-2025
Kommunikation från tillverkaren

Bästa vårdgivare,

Vi kontaktar er angående ett problem som potentiellt kan påverka era patienter som använder FreeStyle Libre 3- och FreeStyle Libre 3 Plus-sensorer. Detta problem gäller inte några andra Libre-sensorer, appar eller avläsare som finns tillgängliga i Sverige.

Vad behöver du veta

Abbott har nyligen identifierat att ett begränsat antal FreeStyle Libre 3- och FreeStyle Libre 3 Plus sensorer kan visa felaktigt låga glukosvärden.

Vi försöker informera dina patienter som använder FreeStyle Libre 3 och FreeStyle Libre 3 Plus sensorer om detta problem genom olika kanaler, inklusive direkta meddelanden via deras app och via e-post (om sådan finns). Dina patienter instrueras att besöka www.FreeStyleCheck.com för att ta reda på om de har några berörda sensorer.

Skaderisker

Om det inte upptäcks kan felaktigt låga glukosvärden under en längre tid leda till felaktiga behandlingsbeslut för personer som lever med diabetes, såsom överdrivet intag av kolhydrater eller att insulindoser hoppas över eller fördröjs. Dessa beslut kan innebära allvarliga hälsorisker, inklusive potentiella skador eller dödsfall, samt andra mindre allvarliga komplikationer.

Åtgärder att vidta

1. Informera dina patienter

Vänligen instruera dina patienter att besöka www.FreeStyleCheck.com för att kontrollera om deras sensorer potentiellt är berörda. För att hjälpa dig med detta har vi bifogat ett meddelande som du kan använda i kommunikationen med dina patienter.

2. Om en patient för närvarande använder eller har en FreeStyle Libre 3 eller FreeStyle Libre 3 Plus-sensor som har bekräftats vara potentiellt berörd via www.FreeStyleCheck.com eller via en kundtjänstrepresentant, ska de omedelbart sluta använda sensorn och kassera den.

Patienter kan begära ersättning för potentiellt berörda sensorer via www.FreeStyleCheck.com. De kan välja "BEKRÄFTA SENSORNS SERIENUMMER" och ange ett giltigt serienummer. Om sensorn är potentiellt berörd, kommer de att uppmanas att ange sina kontaktuppgifter så att en ersättningsprodukt kan skickas till dem utan kostnad.

Patienter kan använda en blodglukosmätare eller den inbyggda mätaren i FreeStyle Libre 3-avläsaren för att fatta behandlingsbeslut när sensorns värden inte stämmer överens med deras symtom eller förväntningar.

3. Kontrollera ditt lager

a. Leveranshistorik

Orderdatum	Order nummer	Lot nummer	Antal som skickats
2025-01-21	IN25039074	T60002642	7
2025-01-22	IN25042089	T60002642	7
2025-01-22	IN25042057	T60002642	7
2025-01-22	IN25042095	T60002642	7
2025-01-23	IN25043188	T60002642	7
2025-01-23	IN25043192	T60002642	7
2025-01-23	IN25043216	T60002642	7
2025-01-23	IN25044999	T60002642	3
2025-01-28	IN25050657	T60002642	7
2025-01-28	IN25052695	T60002642	8
2025-01-28	IN25052697	T60002642	8
2025-01-28	IN25052655	T60002642	8
2025-01-28	IN25052694	T60002642	7
2025-01-28	IN25052639	T60002642	6

2025-01-29	IN25053965	T60002642	7
2025-01-29	IN25055391	T60002642	7
2025-01-29	IN25053963	T60002642	7
2025-01-30	IN25058040	T60002642	7
2025-01-30	IN25058010	T60002642	7
2025-01-30	IN25056690	T60002642	7
2025-01-30	IN25058033	T60002642	2
2025-02-01	IN25061152	T60002642	7
2025-02-06	IN25071488	T60002642	7
2025-02-06	IN25069936	T60002774	7
2025-02-07	IN25072303	T60002774	7
2025-02-08	IN25075028	T60002774	7
2025-02-11	IN25080177	T60002774	7
2025-02-11	IN25078394	T60002774	6
2025-02-12	IN25083218	T60002774	6
2025-02-18	IN25092996	T60002774	7
2025-02-18	IN25095051	T60002774	6
2025-02-19	IN25097527	T60002774	7
2025-02-20	IN25098526	T60002774	7
2025-02-20	IN25100061	T60002774	7
2025-02-20	IN25100027	T60002774	7
2025-02-20	IN25098562	T60002774	7

2025-02-21	IN25101191	T60002774	8
2025-02-21	IN25101193	T60002774	1
2025-02-22	IN25103447	T60002774	2
2025-02-25	IN25106664	T60002774	7
2025-02-25	IN25106674	T60002774	7
2025-02-25	IN25108405	T60002774	7
2025-02-26	IN25110927	T60002774	14
2025-02-26	IN25110925	T60002774	7
2025-02-28	IN25114241	T60002774	9
2025-03-04	IN25119706	T60002774	7
2025-03-04	IN25119782	T60002774	8
2025-03-05	IN25124320	T60002874	7
2025-03-05	IN25124377	T60002874	7
2025-03-05	IN25122794	T60002874	7
2025-03-06	IN25127234	T60002874	7
2025-03-06	IN25127233	T60002874	6
2025-03-06	IN25127215	T60002874	7
2025-03-07	IN25128159	T60002874	9
2025-03-10	IN25132301	T60002874	14
2025-03-11	IN25133603	T60002874	7
2025-03-11	IN25135517	T60002874	7
2025-03-11	IN25133627	T60002874	7

2025-03-11	IN25135586	T60002874	7
2025-03-11	IN25135516	T60002874	7
2025-03-11	IN25133582	T60002874	7
2025-03-12	IN25138258	T60002911	7
2025-03-12	IN25136736	T60002874	7
2025-03-12	IN25136754	T60002874	6
2025-03-13	IN25139421	T60002770	6
2025-03-18	IN25147443	T60002911	7
2025-03-18	IN25147430	T60002911	7
2025-03-18	IN25147441	T60002911	6
2025-03-19	IN25152162	T60002911	7
2025-03-20	IN25152937	T60002911	7
2025-03-21	IN25155777	T60002911	6
2025-03-21	IN25155761	T60002911	7
2025-03-25	IN25163080	T60002770	7
2025-03-25	IN25163045	T60002911	7
2025-03-25	IN25163074	T60002911	9
2025-03-26	IN25164166	T60002911	10
2025-03-26	IN25165831	T60002911	7
2025-03-26	IN25164130	T60002911	6
2025-03-27	IN25166737	T60002911	6
2025-03-28	IN25170737	T60002911	7
2025-03-29	IN25171639	T60002911	7

2025-05-01	IN25231915	T60003016	6
2025-05-03	IN25236069	T60003016	7
2025-05-03	IN25236025	T60003016	7
2025-05-06	IN25241425	T60003039	7
2025-05-07	IN25242801	T60003039	7
2025-05-07	IN25244769	T60003039	6
2025-05-08	IN25246022	T60003039	7
2025-05-08	IN25246014	T60003039	7
2025-05-08	IN25246050	T60003039	6
2025-05-09	IN25248898	T60002770	7
2025-05-09	IN25250298	T60003039	7
2025-05-09	IN25250282	T60003039	7
2025-05-09	IN25250291	T60003039	3
2025-05-09	IN25248892	T60002770	7
2025-05-10	IN25251534	T60003039	2
2025-05-10	IN25251561	T60003039	7
2025-05-13	IN25256974	T60003039	7
2025-05-14	IN25259877	T60003069	1
2025-05-14	IN25259863	T60003069	1
2025-05-14	IN25258027	T60003069	7
2025-05-14	IN25257991	T60003069	1
2025-05-14	IN25259937	T60003069	7
2025-05-15	IN25261215	T60003069	7

2025-05-16	IN25263981	T60003069	7
2025-05-16	IN25264003	T60003069	1
2025-05-16	IN25263969	T60003069	3
2025-05-16	IN25263972	T60003069	7
2025-05-16	IN25263996	T60003069	7
2025-05-16	IN25263986	T60003069	3
2025-05-16	IN25265363	T60003069	1
2025-05-16	IN25265406	T60002770	7
2025-05-17	IN25266517	T60003069	6
2025-05-21	IN25274190	T60003069	7
2025-05-21	IN25274225	T60003069	7
2025-05-22	IN25275498	T60003069	7
2025-05-22	IN25275462	T60003069	2
2025-05-22	IN25275434	T60003069	10
2025-06-10	IN25312693	T60002770	7
2025-06-10	IN25312633	T60003232	7
2025-06-10	IN25312598	T60003232	7
2025-06-10	IN25312632	T60003232	7
2025-06-10	IN25312570	T60003232	7
2025-06-10	IN25312642	T60003232	6
2025-06-11	IN25315693	T60003232	7
2025-06-11	IN25314322	T60003232	6

2025-06-11	IN25314305	T60003232	7
2025-06-11	IN25314261	T60003232	7
2025-06-11	IN25314314	T60003232	6
2025-06-11	IN25314264	T60003232	6
2025-06-12	IN25316960	T60003232	7
2025-06-13	IN25321012	T60003233	7
2025-06-13	IN25319576	T60003232	1
2025-06-13	IN25319563	T60003232	8
2025-06-14	IN25322182	T60003233	10
2025-06-14	IN25322192	T60003233	7
2025-06-14	IN25322188	T60003233	6
2025-06-16	IN25324221	T60003233	7
2025-06-17	IN25327466	T60003233	7
2025-06-17	IN25327524	T60003233	7
2025-06-18	IN25329108	T60003233	8
2025-06-19	IN25331705	T60003233	1
2025-06-20	IN25334171	T60003232	7
2025-06-24	IN25337799	T60002770	7
2025-06-24	IN25337907	T60003232	7
2025-06-24	IN25337761	T60003232	7
2025-06-24	IN25339820	T60003232	7
2025-06-25	IN25342565	T60003232	14

2025-06-25	IN25341079	T60003232	7
2025-06-25	IN25341051	T60003232	7
2025-06-25	IN25342542	T60003232	7
2025-06-25	IN25342591	T60003232	1
2025-06-26	IN25345106	T60003232	14
2025-06-26	IN25345146	T60003232	7
2025-06-30	IN25350418	T60003232	7
2025-06-30	IN25350431	T60003232	1
2025-07-01	IN25351859	T60002770	8
2025-07-01	IN25353362	T60003232	14
2025-07-02	IN25355637	T60003232	7
2025-07-02	IN25354415	T60003232	6
2025-07-03	IN25356751	T60003232	2
2025-07-04	IN25358976	T60003232	6
2025-07-14	IN25374035	T60002770	7
2025-07-28	IN25395368	T60002770	7
2025-07-29	IN25396690	T60002770	8
2025-08-01	IN25404033	T60002770	12
2025-09-23	IN25503248	T60003493	7
2025-09-23	IN25503309	T60003493	10
2025-09-23	IN25503250	T60003493	7
2025-09-23	IN25503269	T60003493	9
2025-09-24	IN25506047	T60003493	7

2025-09-24	IN25506041	T60003493	1
2025-09-24	IN25507541	T60003493	4
2025-09-24	IN25506088	T60003493	2
2025-09-24	IN25506091	T60003493	2
2025-09-24	IN25506086	T60003493	2
2025-09-24	IN25507487	T60003493	6
2025-09-25	Omskick av order: IN25474785	T60003493	7
2025-09-26	IN25512710	T60003493	1
2025-09-26	Omskick av order: IN25479357	T60003493	7
2025-09-26	IN25511104	T60003493	7
2025-09-29	IN25513698	T60003493	2
2025-09-29	IN25513714	T60003493	6
2025-09-30	IN25517155	T60003493	14
2025-10-01	IN25519919	T60003493	4
2025-10-01	IN25518854	T60003493	7
2025-10-02	IN25524205	T60003493	1
2025-10-03	IN25525543	T60003493	9
2025-10-06	IN25529843	T60003493	1
2025-10-07	IN25533039	T60003493	7
2025-10-07	IN25533041	T60003493	7
2025-10-07	IN25533141	T60003493	9
2025-10-07	IN25533052	T60003493	6

2025-10-08	IN25534394	T60003493	7
2025-10-09	IN25537262	T60003493	7
2025-10-10	IN25539501	T60003493	7
2025-10-13	IN25541815	T60003493	7
2025-10-13	IN25543819	T60003493	7
2025-10-14	IN25547237	T60003493	2
2025-10-15	IN25550053	T60003493	14
2025-10-16	IN25551258	T60003493	6
2025-10-17	IN25555012	T60003529	7
2025-10-20	IN25558142	T60003529	7
2025-10-20	IN25558077	T60003529	7
2025-10-20	IN25558035	T60003529	7
2025-10-22	IN25564155	T60003529	7
2025-10-23	IN25566566	T60003529	2
2025-10-23	IN25566578	T60003529	7
2025-10-23	IN25566646	T60003529	1
2025-10-23	IN25566732	T60003529	1
2025-10-23	IN25566699	T60003529	7
2025-10-24	IN25568949	T60003529	7
2025-10-24	IN25568948	T60003529	7
2025-10-24	IN25568934	T60003529	2


b. Har du fortfarande sensorer från de berörda partierna i lager?

Om ja, vänligen;

- i. Räkna antalet berörda sensorer och kontakta oss via order.adc@abbott.se för att informera oss om antal
- ii. Vi kommer att ordna kostnadsfria ersättningsprodukter.
- iii. Kassera de berörda sensorerna

Hur man hittar sensorernas serienummer


Patienter som använder en FreeStyle Libre 3 eller FreeStyle Libre 3 Plus-sensor kan hitta serienumret i appen eller avläsaren. Serienumret finns också på etiketten på undersidan av sensorapplikatoren eller på kartongen (Om patienten använder en sensor tillsammans med en ansluten enhet för insulintillförsel, se bruksanvisningen tillhörande den anslutna enheten om hur man lokaliserar sensorns serienummer).

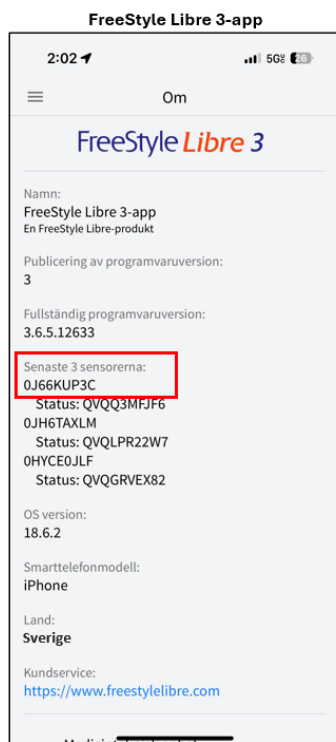

Medicinteknisk anmärkning:
I appen, gå till Huvudmenyn,
välj Om-skärmen och leta upp
sensorns serienummer under "Senaste 3
sensorerna"



I avläsaren, gå till Inställningsmenyn,
välj Systemstatus och sedan
Systeminformation.

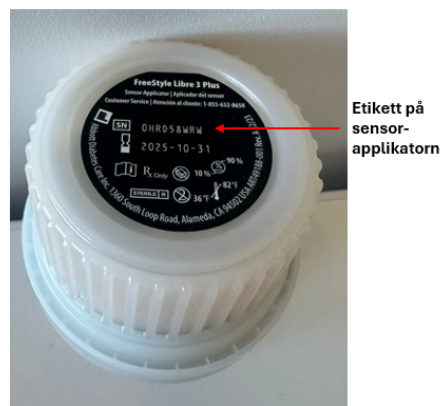

Vi har informerat Läkemedelsverket.

Om du har ytterligare frågor eller behöver rapportera några biverkningar eller kvalitetsproblem som uppstått vid användning av FreeStyle Libre 3/FreeStyle Libre 3 Plus sensorer, vänligen kontakta Abbotts kundservice på 020-190 11 11, måndag till fredag (helgfria vardagar) mellan kl 08:00 och 18:00.

Tack för att du uppmärksammar detta viktiga säkerhetsmeddelande till marknaden.
Vi ber uppriktigt om ursäkt för eventuella besvär detta kan ha orsakat.

Med vänliga hälsningar,
Abbott