


Rygginställningar

Alla våra komfortrullstolar har ryggband i standardutförande.

Öppna alla ryggband. Ryggmattan kan vara kvar. Sätt patienten i rullstolen.

Ställ in ryggbanden efter patientens kropp. Börja med att ge övre delen av bäckenet stöd (vid SPIS) Är bäckenet fast kan inte patienten rätta upp kroppen utan banden behöver följa ryggkurvaturen.

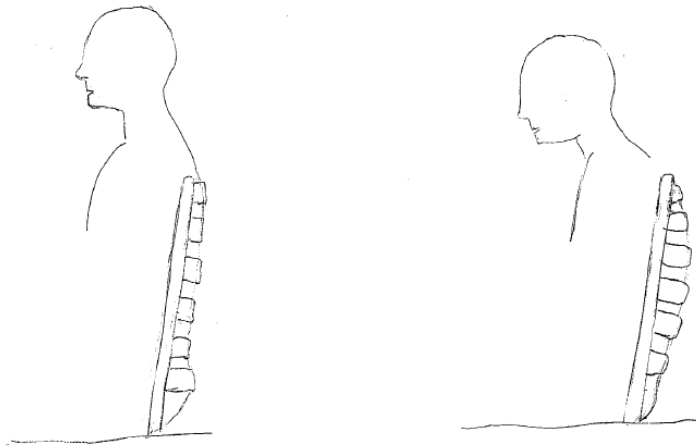

På en del komfortrullstolar går det att bredda ryggen. När ryggen breddas och ryggbanden ställs in kan det hjälpa patienten att inte falla åt sidan.

Så här breddjusteras ryggen på rullstolarna Azalea och Dahlia

[Film på YouTube: Hur man breddar en Flex3 rygg](#)

Så här ändras rygghöjden på rullstolarna Azalea och Dahlia:

[Film på YouTube: Hur man justerar rygghöjden på en Flex3](#)

Så här vänds ryggen till rullstolarna Azalea och Dahlia om det behövs mer utrymme för rumpan:

[Film på YouTube: Hur man vänder ryggen på en Flex3-rygg](#)